


本書をお読みになる前に、別冊の「取扱説明書」の「安全上のご注意」と「使用上のご注意」をお読みください。

ボイスレシーバーを使う

- 1 電源が「切」になっていることを確認し、電池を入れる
付属の単4形充電式ニッケル水素電池を1本使います。

付属の電池は出荷時に充電されていますので、すぐにご使用いただけます。

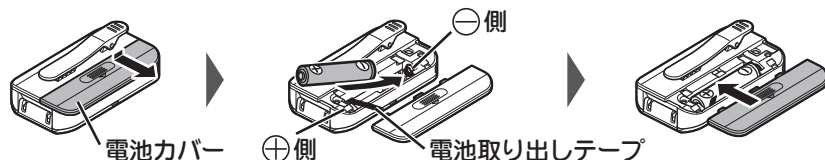

- 電池の向きを、本体内部の表示に合わせて正しく入れてください。


- 2 音量を「0」にし、イヤホンコードを本体につなぐ



音量を大きくしたままイヤホンを耳に入れると、ピー音(ハウリング)が発生する場合がありますのでご注意ください。

- 3 左右表示を確認の上、イヤホンをそれぞれの耳に入れる

- イヤホンは耳にしっかり入れてください。
- 左側には半円形の凸形状があります(図参照)。
- イヤーピースのサイズが合わない、または聞き取りにくいときは、イヤピースのサイズを変更してください。(→取扱説明書18ページ)

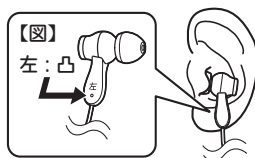

- 4 電源を「入」にする

電源ランプが緑色に点灯します。



- 5 音量を調節する

- 「ピー」という音(ハウリング)がしたら音量を下げてください。
- 片方の音だけ聞き取りにくいときは、左右の音量バランスを調節してください。(→取扱説明書22ページ)



詳しい使いかたについては、別冊の取扱説明書をお読みください。


本書をお読みになる前に、別冊の「取扱説明書」の「安全上のご注意」と「使用上のご注意」をお読みください。

聴こえ調整をする

音声ガイドに合わせてあなたの聴こえを調整できます。
左耳および右耳より“ピー”と複数回音が鳴りますので、聞こえるたびに本機の決定ボタンを押してください。

聴こえ調整は、周囲が静かな場所で、電源を入れて3秒以上たってから始めてください。

1 本体前面のカバーを開け、開始ボタンを押す

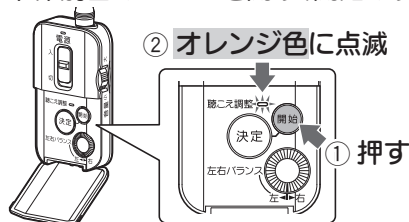


聴こえ調整ランプが
オレンジ色に点滅します。

調整を始めます。ピーと聞こえるたびに決定ボタンを押してください。まず左耳です

と音声ガイドが流れます。

2 左耳から“ピー”と聞こえるたびに、決定ボタンを押す

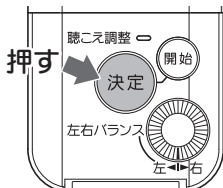

次に右耳ですと音声ガイドが流れます。

3 右耳から“ピー”と聞こえるたびに、決定ボタンを押す

4 これで調整をおわりますと音声ガイドが流れます

聴こえ調整ランプが緑色に3秒間点灯したのち、消灯します。

緑色に点灯後、消灯



※このまま本機をご使用いただけますが、調整すると音量が下がる場合がありますので音量ダイヤル、左右バランスダイヤルで調節してください。

※調整結果は本機に記憶されますので、ご使用のたびに聴こえ調整をする必要はありません。再度調整が必要な場合は、手順1からやり直してください。

詳しい使いかたについては、別冊の取扱説明書をお読みください。